

COVID 19 - Brèves instructions pour l'utilisation du formulaire et du matériel

Chère et Cher Docteurs, Chers collaborateurs du cabinet médical,

Nous vous remercions de lire attentivement ces instructions afin de nous permettre d'exécuter votre demande d'analyse dans les plus brefs délais.

Formulaire de Demande

1. Renseignez toujours bien le **nom du prescripteur**, et pour les cliniques le nom du médecin demandeur
2. Indiquez le **numéro de portable** où le résultat doit vous être communiqué dans le meilleur délai. Les résultats positifs sont communiqués oralement.


Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID 19)	Prescripteur	Numéro demandeur
	Nos Conditions Générales (CG) s'appliquent (www.synlab.ch)	

Médecin demandeur	Tél. direct
-------------------	-------------

Tous les résultats COVID 19 vous sont automatiquement envoyés selon vos modes de communication habituels (papier, fax, portail de résultat, courriel, etc.)

Prélèvement et envoi d'échantillons (vidéo sur www.synlab.ch)

1. Immobilisation de la tête du patient et introduction de l'écouvillon **(A)** (le plus fin des trois uniquement) dans les voies nasales jusqu'à ce qu'au nasopharynx
2. Tournez l'écouvillon pendant environ 10 secondes. Cette procédure peut provoquer une toux et un larmoiement
3. Si ce n'est pas possible, essayez la procédure par l'autre narine
4. Cassez l'écouvillon sur le bord du tube **(B)** et placez le dans le liquide de transport. **Fermez bien le bouchon**
5. **L'identification du patient** sur le tube est obligatoire
6. Placez ensuite le tube de transport **(B)** dans la protection de tube **(C)** **bien fermé** également, et glissez le tout dans un sachet d'expédition. **Ne pas mélanger** avec d'autres prélèvements.
7. Inscrivez **COVID19** sur le sachet d'expédition pour faciliter le tri à la réception

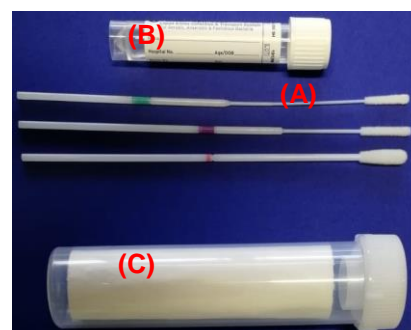

Nous vous répondons avec plaisir au 058 400 15 16 en cas de questions

En vous remerciant pour votre collaboration et en vous souhaitant plein succès

Meilleures salutations de toute l'équipe

SYNLAB SUISSE SA Team.